


## Anleitung Velumount Intro Einsetzen (ohne Hilfsmittel)

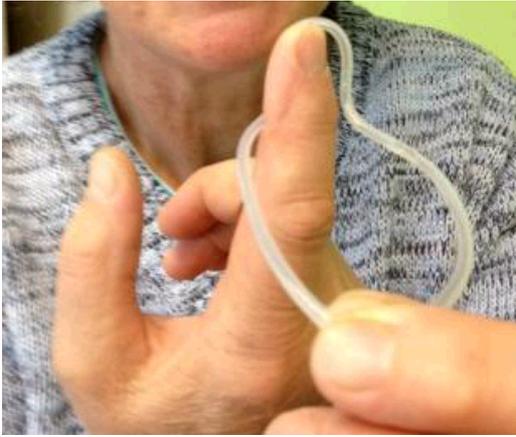

Den Pharynxbogen mit dem Zeigefinger **2 Min. vor 12.00** strecken (gemäss Bild). Mit dem Daumen und Zeigefinger bei der Verkettung um ca. **6 Uhr** festhalten und unter die Uvula (Halszäpfchen) schieben.

Tipp: Den Buchstaben A sprechen oder ein Gähnen simulieren hebt das Gaumensegel an, das Einsetzen wird dadurch einfacher.

Den Drahtverschluss bei **6.00 Uhr**, bis unter die Schneidezähne nachschieben. Dann den Ring um die obere Zahnreihe platzieren. Nun ist die Spange perfekt eingesetzt.

## Anleitung Velumount Intro Einsetzen (mit Hilfsmittel)



Den Ring mit dem Holzstäbchen **2 Min vor 12.00 Uhr zu 6.00 Uhr** spannen, bis der Pharynxbogen flach liegt. Den Pharynxbogen mit dem Holzstäbchen unter die Uvula (Halszäpfchen) an die Rachenhinterwand schieben und den Drahtverschluss bei **6.00 Uhr**, bis unter die Schneidezähne nachschieben.

Schlucken und das Holzstäbchen herausziehen, dann ist der Intro eingesetzt.